

**Pro-Wellness – Hygiene+**  
**Bechtozid Soft**  
**Dezynfekcja foteli masujących**

**Zastosowanie:**

Bechtozid Soft to gotowy do użycia środek, przeznaczony do dezynfekcji delikatnych powierzchni pokrytych skórą lub materiałem syntetycznym tj. eko-skóra i winyl. Polecany do dezynfekcji foteli zabiegowych, stołów do masażu, łóżek rehabilitacyjnych oraz rehabilitacyjnego sprzętu gimnastycznego. Preparat zwalcza szerokie spektrum bakterii oraz dezaktywuje wirusy w ciągu 1 minuty. Idealny do stosowania między wizytami pacjentów lub po użyciu sprzętu przez jednego użytkownika.

**Cechy produktu**

- Produkt medyczny
- Bez alkoholu
  
- Wolny od fenoli i aldehydów
- Bezwonny

**Instrukcja użycia:**

Rozpyl preparat na powierzchnię lub czystą ściereczkę.

Rozprowadź równomiernie i pozostaw na 1 minutę.

Wytrzyj powierzchnię czystą szmatką.

Upewnij się, że powierzchnia jest sucha przed kolejnym użyciem.

**Składniki aktywne:**

100 g produktu Bechtozid Soft zawiera:

<0,3 % benzylo-C12-16 alkilo chlorków

<0,3 % didecyldimethylammoniumchloride

<0,3 % C12-14-alkil[(etylo-fenylo)-metylo]dimetylo chlorek sulfotlenek

**UWAGI:**

- Chronić przed dziećmi
- Przechowywać z dala od ciepła, mrozu i światła słonecznego
- Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/twarzy
- Unikać kontaktu ze skórą

- W przypadku kontaktu ze skórą: spłukać skórę pod strumieniem wody i zasięgnąć porady lekarza
- Nie należy wdychać preparatu
- Produkt do stosowania tylko przez przeszkolony personel
- Wszelkie poważne wypadki, które mają miejsce w związku z produktem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi użytkownika
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

**Ostrzeżenie:**

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.



 537.300PL

- BATCH: PFD1131201325
- Data produkcji: 01.02.2026



Data ważności: 2,5 roku od daty produkcji, 1 rok po otwarciu



Wyprodukowano przez  Alfred Becht GmbH, Carl-Zeiss-Str.16, 77656 Offenburg, Germany dla Pro-Design Sp. z o.o. ul. Cegielniana 62, 42-700 Lubliniec, Polska, tel. +48 732 959 979 [www.comodo.pl](http://www.comodo.pl) comodo@comodo.pl